

OneTouch Verio Reflect®

Sistema de control de glucosa en sang Guia d'inici ràpid

Utilitzeu aquesta guia per conèixer el vostre mesurador i seguiri els passos per començar.

IMPORTANT: Llegiu el fullet del propietari que s'inclou amb el vostre sistema.


1 Configura el mesurador

Enceneu el mesurador

Mantén premut **OK** fins que aparegui la pantalla de benvinguda. Utilitzeu **↶** o els botons **↷** per editar cada paràmetre i premeu **OK** per confirmar.

Estableix l'idioma

Ressalteu l'idioma que voleu i premeu **OK**.

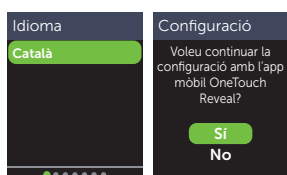

Opcional:

Completa la configuració amb l'aplicació mòbil OneTouch Reveal®*


Seleccioneu **Sí** perquè l'aplicació us guii durant la configuració.

Baixa l'aplicació mòbil OneTouch Reveal® abans de vincular el mesurador i el dispositiu mòbil.




Estableix l'hora

Premeu **OK** si l'hora és correcta o edita i confirma.

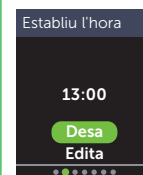


Estableix la data

Premeu **OK** si la data és correcta o edita i confirma.

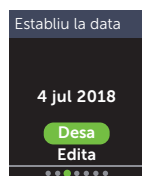


Estableix límits de rang objectiu de menjar

Premeu **OK** si els límits preestablerts de rang objectiu Abans i després dels àpats són correctes o editeu i confirmeu.

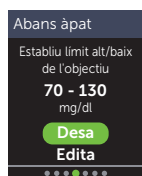


Estableix el seguiment de proves

Premeu **OK** si l'objectiu preestablert és correcte o edita i confirma.

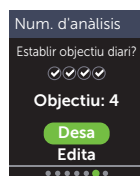

Estableix un objectiu mitjana de 90 dies

Premeu **OK** si l'objectiu mitjana de 90 dies és correcte o edita i confirma.

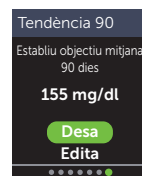

NOTA: Parleu amb el vostre professional sanitari sobre els límits de rang objectiu adequats, l'objectiu de prova diari i l'objectiu mitjana de 90 dies per a vosaltres.


Icones del mesurador

	Bluetooth® funció activada
	Sincronització
	Resultat de la solució de control
	Bateria baixa
	Punts de progrés de navegació per pantalla

Consulteu el llibret del propietari per obtenir els símbols i les icones del mesurador i els seus significats.

* Visita www.OneTouch.com/global per obtenir més informació sobre l'aplicació mòbil OneTouch Reveal® i si està disponible al vostre país.

ONETOUCH®

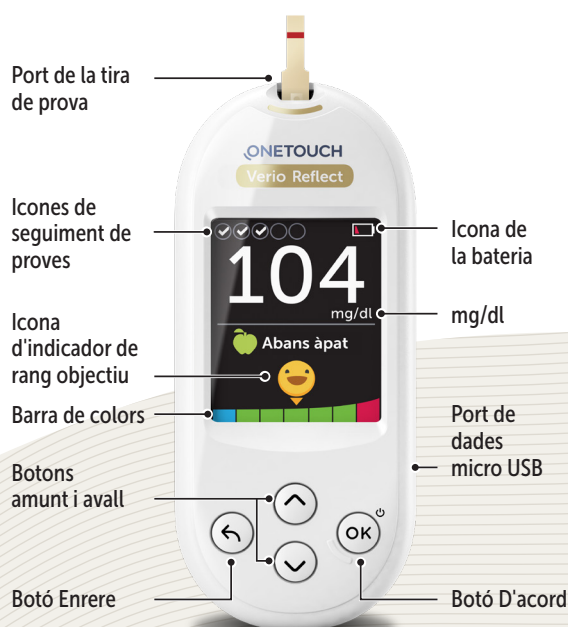

OneTouch Verio Reflect®

Sistema de control de glucosa en sang

Guia d'inici ràpid

2 Fes un anàlisi

Renteu-vos les mans amb aigua tèbia i sabó, esbandiu-les i assequeu-les abans de prendre la mostra. Traieu la tapa del dispositiu de punció i introduïu una llanceta estèril. Gireu la coberta protectora. Torneu a col·locar la tapa al dispositiu.




Introduïu una tira de prova (costat daurat i 2 puntes de plata cap a vosaltres) per encendre el mesurador.

Pues de plata



Port de la tira de prova

Ajusteu la configuració de profunditat al dispositiu de punció. Col·loqueu el dispositiu de punció i subjecteu-lo fermament contra el costat del dit. Premeu el botó d'alliberament. Premeu suaument el dit per obtenir una gota rodona de sang.

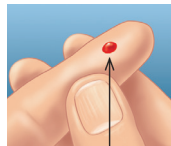

Mida aproximada

Apliqueu la mostra de sang al canal a banda i banda de la tira reactiva.

Un cop s'omple el canal, es tornarà vermell i el resultat apareixerà en uns 5 segons.




Apliqueu sang

3 Visualitza el teu resultat

Indicador de rang objectiu dinàmic ColourSure®

L'indicador de rang objectiu dinàmic ColourSure® us permet saber a l'instant si el vostre resultat està per sota (blau), dins (verd) o per sobre (vermell) dels vostres límits de rang objectiu. També mostra quan el vostre resultat s'aproxima a l'extrem baix o superior del vostre rang objectiu. Una nota de text o un emoji apunta a un segment de la barra de colors.

Exemples de resultats

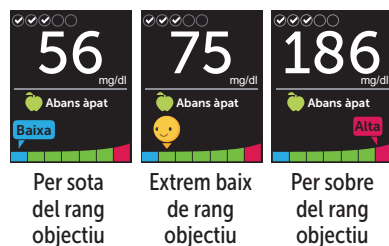

Marcador d'àpats i esdeveniments


Un marcador d'abans àpat (🍏) s'aplicarà automàticament al vostre resultat. Podeu canviar el marcador de l'àpat a Després àpat (🍷) i afegir un marcador d'esdeveniment.



Missatges de Blood Sugar Mentor™

El Blood Sugar Mentor™ proporciona informació sobre com ho esteu fent i orientació sobre la gestió de la diabetis, inclosos missatges educatius i de motivació basats en els vostres resultats de glucosa actuals i anteriors i altres dades de seguiment.


Exemples de missatges de Blood Sugar Mentor™

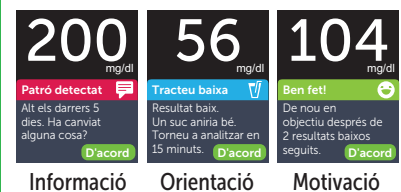


4 Connecteu-vos a un dispositiu mòbil

La tecnologia **Bluetooth®** us permet enviar sense fil els vostres resultats a un dispositiu mòbil on podeu utilitzar l'aplicació mòbil OneTouch Reveal® per revisar i representar amb gràfics els vostres resultats, establir objectius de proves diàries, veure missatges de Blood Sugar Mentor™ i ajudar a identificar patrons.

Al menú Configuració, resalteu **Bluetooth** i premeu (OK).

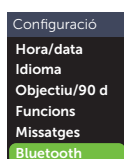


Un ✓ indica si el **Bluetooth®** actualment està activat o desactivat. Premeu (↕) o (↕) per canviar l'estat del **Bluetooth®** a Activat i premeu (OK).

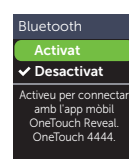

Quan us ho demani el vostre dispositiu mòbil, introduïu el PIN que es mostra.

Exemple de PIN

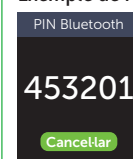

La marca i el logotip de **Bluetooth®** són marques registrades propietat de Bluetooth SIG, Inc., i qualsevol ús d'aquestes marques per part de LifeScan Scotland Ltd. es realitza sota llicència. Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.